

MANUAL DE UTILIZARE

Saltea antiescară tubulară, compresor silențios, Albastru închis



Descriere produs

- ✓ Eficientă în prevenirea cât și tratarea escarelor
- ✓ Compresor inclus
- ✓ Recomandat persoanelor imobilizate la pat
- ✓ Indicată pentru o greutate de până la 135 kg
- ✓ Consum redus de energie
- ✓ Putere mare a presiunii alternative
- ✓ Ușor de manevrat

Salteaua antiescară este eficientă atât în prevenirea cât și în tratarea escarelor apărute la pacienții imobilizați la pat. Sistemul antidecubit este format dintr-o saltea antiescară de tip cilindru și o pompa de presiune alternativă care reglează presiunea în funcție de greutatea pacientului. Sistemul se adresează pacienților având o greutate de până la maxim 135 kg.

Escara este o rană la nivelul pielii care apare în urma menținerii corpului într-o poziție fixă, o perioadă îndelungată. Escarele se mai numesc și escare de decubit sau ulceratii de presiune. Cauzele apariției escarelor sunt date de imposibilitatea irigării țesutului înconjurător și a pielii datorită presiunii exercitate de către oase asupra planului dur.

Sistemul antiescară, reduce presiunea de decubit exercitată în permanență de către corpul persoanelor imobilizate, realizează o alternanță a punctelor de contact cu pielea, făcând un masaj ușor care îmbunătățește circulația sanguină la nivelul pielii și care asigură o mai bună oxigenare a țesuturilor.

PREVENIREA ȘI TRATAREA ESCARELOR. Salteaua este eficientă atât pentru prevenirea escarelor cât și pentru tratarea escarelor existente, crescând considerabil șansa de vindecare a escarei deja apărute și micșorând, de asemenea, și durata de ei de tratare.

Trebuie ținut cont de faptul că eficiența depinde și de organismul fiecărui bolnav, precum și de îngrijirea corectă a acestuia.

Sistemul este ușor de utilizat, de instalat și de întreținut. Totodată, este foarte silențios.


Salteaua de tip cilindru este realizată dintr-un material netoxic Nylon lavabil, fiind foarte ușor de întreținut, formată din 22 de tuburi.

TEHNOLOGIA AERULUI ALTERNAT. Compresorul de presiune alternativă reglează presiunea în funcție de greutatea pacientului. Acesta trebuie să funcționeze în permanență cât timp pacientul este așezat pe saltea. Compresorul asigură umflarea și dezumflarea alternativă a celulelor, prevenind apariția escarelor. Umflarea alternativă a celulelor (rânduri pare/rânduri impare) de către compresor determină schimbarea punctelor de presiune dând posibilitatea vascularizării tuturor țesuturilor. Ușurează efortul persoanele ce îngrijesc pacientul, să nu fie nevoiți să îi mute pe aceștia la fel de des, deoarece salteaua pneumatică pentru pat alternează umflarea și dezumflarea la fiecare 10 minute.

COMPRESOR DE PRESIUNE REGLABIL ȘI SILENTIOS. Această saltea sub presiune pentru escare este echipată cu un compresor de presiune silențios. Nivelul de zgomot este sub 50dB. Oferă un flux de aer constant pentru umflarea și dezumflarea pernei de presiune alternativă.

MATERIALE PREMIUM. Salteaua este realizata din material non-toxic (PVC) rezistent, impermeabil, rezistenta la flacăra. Este ușor de curățat. Puteți șterge cu o cârpă umedă sau șervețele umede. Sistemul se adresează pacienților având o greutate de pana la 135 Kg.

Pachetul conține: 1x saltea, 1x kit de reparare, 1x set furtunuri , 1x compresor,

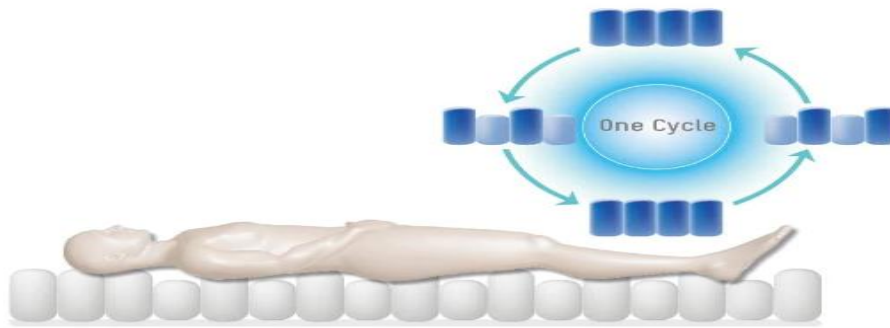

SISTEMUL DE REDISTRIBUIRE A PRESIUNII
POATE PREVENI RANIREA IN URMA
PRESIUNII EXERCITATE DE O SUPRAFATA
PLANA

Specificații produs

- Material: Nylon PVC
- Număr tuburi: 22
- Dimensiuni saltea: 200 x 90 x 7 cm
- Greutate saltea: 2.8 kg
- Greutate maxima pacient:135 kg

Compresor

- Tensiune de alimentare: 220V
- Frecventa: 50Hz $\pm$ 1Hz
- Interval presiune: 70-130 mmHg
- Debit: 4 litri/minut
- Greutate compresor: 0.8 kg
- Dimensiuni compresor: 22 x 12 x 8 cm

Instructiuni de utilizare:

- Așezați salteaua pe o suprafață orizontală. Salteaua trebuie desfăcută și întinsă pentru a putea fi umflată.
- Conectați tuburile de alimentare cu aer de la saltea, cu pompa. Asigurați-vă că tuburile nu sunt răsucite sau îndoite.

- După ce conectați tuburile, porniți pompa de alimentare. Indicatorul comutatorului de alimentare trebuie să fie ON.
- Setați nivelul de viteză pompare cu ajutorul butonului cu indicații numerale.
- După ce salteaua este umflată, se poate așeza pacientul pe saltea.



Atentie!

- Pompa trebuie cuplată permanent pentru a umfla salteaua. Se decuplează doar atunci când nu se mai utilizează salteaua.





Avertisment!

Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, sau rănire a persoanelor:

- Salteaua nu trebuie lăsată nesupravegheată atunci când este cuplată la priză. Este necesară o atenție sportită atunci când este utilizată de copii sau persoane invalide.
- Nu utilizați niciodată acest produs dacă are cablul sau ștecherul deteriorate, dacă nu funcționează corect, dacă a fost scapat în apă.
- Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.
- Nu blocați niciodată orificiile de aer. Feriți orificiile de aer de scame, păr sau altele asemenea.
- Nu scăpați sau nu introduceți nici un obiect în deschiderea saltelei sau a pompei, ori furtun.
- Nu utilizați în aer liber salteaua, sau în spații cu aerosoli (spray).
- Conectați acest produs numai la o priză împământat corespunzător.

Când pompa de aer nu mai pornește, siguranța de plastic poate fi înlocuită.
(Vezi poza 1)

Instrucțiuni pompa aer

- Pentru a pune în funcțiune pompa de aer, se cupleză mai întâi cu turburile de aer a saltelei, apoi după ce vă asigurați că este fixată, se alimentează la priză.
- Puneți pompa de aer pe o suprafață întinsă sau se poate atârna în capatul patului.
- Pompa de aer trebuie să fie lăsată deoparte într-un loc uscat și curat pentru a preveni deteriorarea ei (a se feri de locuri umede și pline de praf).

Poza 1

