

MANUAL DE UTILIZARE

**Vmax – Aparat profesional de îngrijire facială cu
ultrasunete radar**



Principiu de funcționare

Prin penetrarea țesutului cu ajutorul undelor radar mecanice, energia termică de 65°C este transferată cu precizie la nivelul stratului SMAS al pielii (aproximativ 3,5–4,5 mm adâncime). Această acțiune stimulează fibroblastele să genereze celule noi (până la 40 de diviziuni pe secundă), contribuind la dizolvarea celulelor adipoase faciale, strângerea conturului pielii, repararea țesutului fibros deteriorat și stimularea producției de collagen.

Regenerarea celulară obținută astfel duce rapid la un efect de subțiere a feței și la o piele fermă, elastică și catifelată.

În același timp, localizarea precisă a unei radar permite identificarea selectivă a celulelor adipoase, iar prin metoda unică de fricțiune controlată a mânerului, energia ajunge exact la adâncimea dorită, fără a provoca durere utilizatorului.

Caracteristici

- Nu produce deteriorări la nivelul pielii – energia transmisă nu provoacă durere în timpul aplicării.
- Ajută la corectarea mai multor probleme ale pielii, inclusiv stimularea regenerării collagenului, eliminarea ridurilor, remodelarea conturului facial și strângerea pielii lăsate.
- Capul de tratament transmite energie de înaltă intensitate către straturile pielii, restabilind fermitatea și elasticitatea naturală a acesteia, reducând vizibil semnele îmbătrânirii.
- Echipat cu sonde de 3.0 mm și 4.0 mm, cu sistem de focalizare precisă, tratamentul este direcționat exact, fără a afecta țesuturile din jur.
- Ecran tactil intuitiv, care permite controlul ușor al modului de lucru, intensității și vitezei.
- Tehnologie non-invazivă, fără ace, fără intervenție chirurgicală, fără efecte secundare.
- alegere ideală pentru saloanele de înfrumusețare profesionale.


Eficiență și beneficii

Lifting facial și remodelare a conturului feței – strângerea și ridicarea completă a pielii pentru îmbunătățirea formei faciale generale.

Tonifierea pielii și reducerea laxității – crește producția de collagen, sporește elasticitatea pielii, redă fermitatea și aspectul tânăr.

Stimularea metabolismului și inversarea semnelor îmbătrânirii – remodelează conturul facial, ridică zona ochilor, obrații, fruntea și gâtul, îmbunătățind armonia feței.

Eliminarea ridurilor și netezirea pielii – reduce ridurile profunde și fine, redă pielii un aspect neted, uniform și cu pori aproape invizibili.

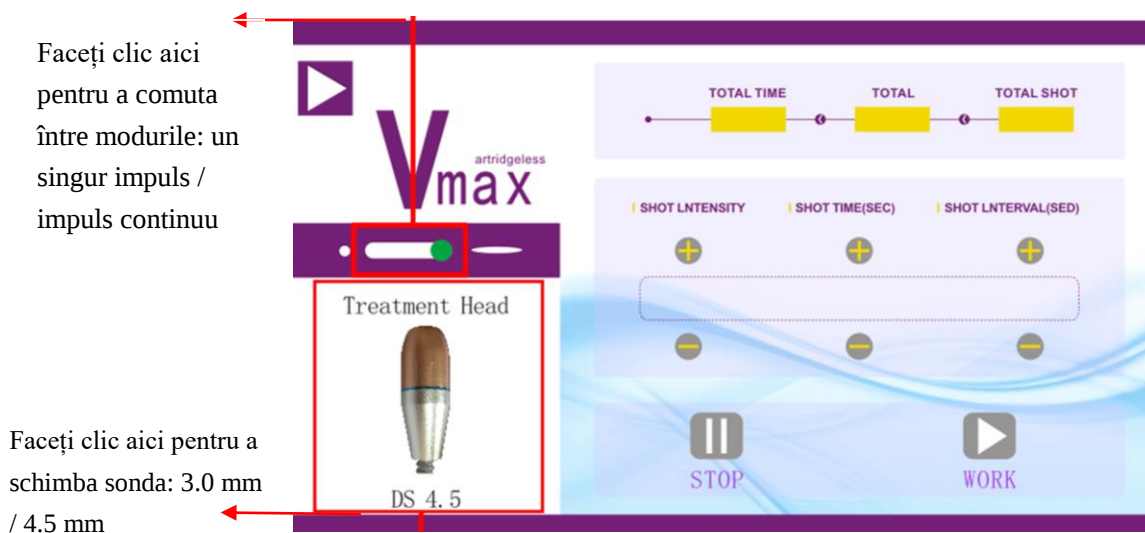

Notă:

Dacă doriți să schimbați sonda sau modul de lucru, trebuie mai întâi să apăsați butonul STOP.

Sonda 3.0 mm

Sonda de 3.0 mm acționează la o adâncime de 3,0 mm, corespunzătoare stratului fibros subcutanat al dermului.

Aceasta stimulează fibroblastele să se dividă și să formeze celule noi cu o frecvență de până la 40 de ori pe secundă,

favorizând producția de fibre de colagen, elastină și fibre reticulare.

Tratamentul contribuie la obținerea rapidă a unui contur facial în formă de V, îmbunătățind forma și fermitatea feței.

Sonda 4.5 mm

Sonda de 4.5 mm acționează la o adâncime de 4,5 mm sub piele, transmițând o energie termică constantă de 65°C către stratul fascial SMAS al pielii.

Aceasta întărește eficient aderența dintre piele și mușchi, contribuind la ridicarea și tonifierea fermă a țesuturilor faciale.